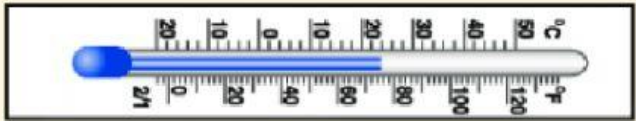


TIẾT 15: ĐO NHIỆT ĐỘ

1. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI NHIỆT KẾ SAU (KÉO THẢ)

NHIỆT KẾ RƯỢU DÙNG ĐỂ ĐO NHIỆT ĐỘ PHÒNG	NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI	NHIỆT KẾ Y TẾ THỦY NGÂN HOẶC DẦU DÙNG ĐỂ ĐO THÂN NHIỆT	NHIỆT KẾ RƯỢU DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
--	--------------------------------	---	--

2. CÁCH SỬ DỤNG NHIỆT KẾ (KÉO THẢ)

NHIỆT KẾ THỦY NGÂN	NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ



Bước 1: Vẩy mạnh cho thủy ngân bên trong nhiệt kế tụt hết xuống bầu.

Bước 3: Đặt đầu kim loại của nhiệt kế xuống lưới.

Bước 4: Chờ khoảng 2 – 3 phút, lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.

Bước 3: Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

Bước 2: Bấm nút khởi động.

Bước 2: Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

Bước 1: Lau sạch đầu kim loại của nhiệt kế.

Bước 4: Chờ khi có tín hiệu “bíp”, rút nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.

Bước 5: Tắt nút khởi động.

***** CÁCH XỬ LÝ KHI NHIỆT KẾ THỦY NGÂN VÔ TÌNH BỊ VỠ**