

ACT2. Neteja del material

L'objectiu de l'activitat és conèixer el procediment de neteja del material.

1) COMPLETA el següent text:

La _____ serveix de suport i nutrient als microorganismes i, per evitar que aquests siguin un _____ per a la salut humana, és necessari dur a terme la _____. En eliminar la brutícia, s'elimina gran part de la _____, encara que no tota, de manera que seran necessaris processos posteriors, com la _____ i l'_____.

Però no només cal eliminar la brutícia de l'instrumental i dels materials, sinó també de les diferents localitzacions dels centres sanitaris, distingint diferents zones en funció del _____ per als pacients. Així, tindrem zones d'_____, com el bloc quirúrgic o l'UCI; de _____, com les unitats d'hospitalització, i de _____, com les consultes externes.

2) COMPLETA el següent text:

Inicialment, s'ha de classificar el material per a la seva neteja separant _____. També, perquè la neteja sigui eficaç, l'instrumental articulat (tisoires, pinces, fòrceps) ha d'estar _____.

Els instruments amb restes de brutícia s'han de sotmetre a una _____ amb _____. En la fase de neteja s'utilitza _____ i detergent.

Després de la neteja, els instruments s'han d'aclarir sempre a fons amb aigua neta abundant i en el cas del rentat automàtic, l'última aclarida es farà amb _____.

3) INDICA en quin moment de la neteja d'instrumental metàl·lic s'afegeix a l'aigua un producte lubricant:

	En l'esbandida final.
	En la neteja i esbandida inicials.

	Després de l'assecat.
	En la classificació del material.

4) **INDICA** quina de les següents afirmacions sobre la neteja de material sanitari són vertaderes (V) i quines són falses:

Afirmacions	V	F
L'aigua és l'element on la brutícia ha de ser dissolta.		
L'acció mecànica consisteix en utilitzar detergents amb aigua per absorbir i suspendre els gèrmens.		
L'acció química consisteix a fregar, raspallar i ruixar mitjançant aigua a pressió o amb rentat ultrasònic.		
El bany d'ultrasons és apropiat per a netejar material òptic		
La calor millora el poder de dilució de l'aigua i del sabó o detergent.		
En la neteja automàtica, l'instrumental articulats (tissores, fòrceps, etc.) s'ha d'introduir obert.		
Un instrument termosensible s'ha de rentar de forma automàtica en cicles normals.		